


Istruzioni per l'esecuzione del test salivare



Si prega di leggere con attenzione.

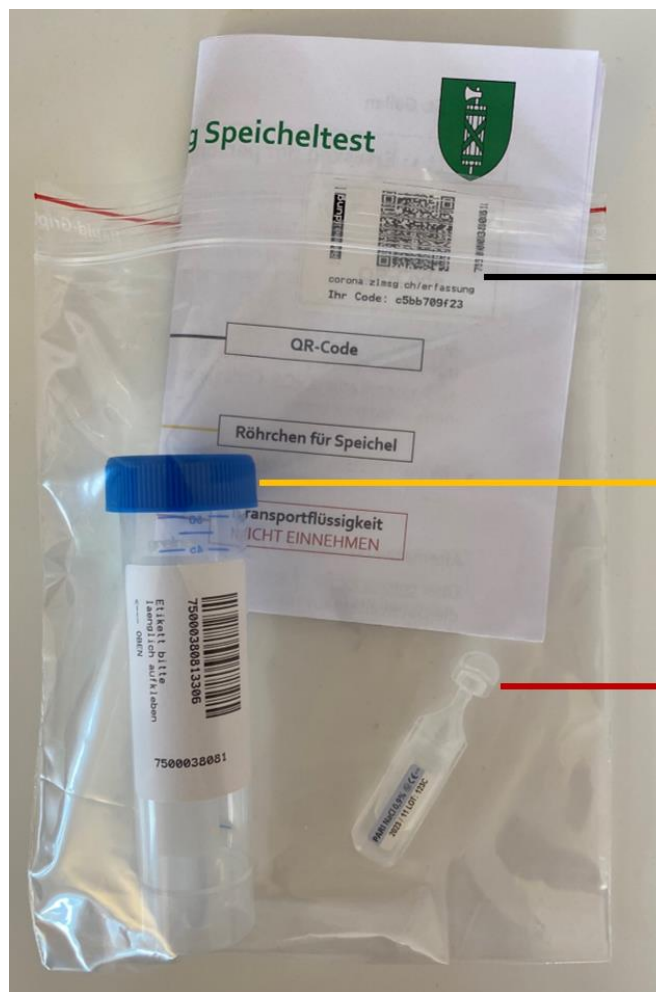

Codice QR

QR-Code

Provetta per la saliva

Liquido di conservazione

NaCl (soluzione salina)

Contenuto

- Provetta vuota (larga) per la saliva con codice a barre (tappo giallo, rosso o blu)
- Liquido di conservazione (fialetta)
- Codice QR per la registrazione dei dati e la consultazione del risultato
- Busta di plastica richiudibile

Il test è **volontario** per tutti i dipendenti. I costi, **inclusi quelli di eventuali test successivi**, sono sostenuti **dalla Confederazione/dal Cantone**.

È responsabilità di ogni singolo dipendente inoltrare i risultati all'autorità superiore.

Punto 1: registrare i dati personali

1. Scansionare il codice QR con lo smartphone

- Scansionare il codice QR (si trova sulla parte anteriore di queste istruzioni) con lo smartphone (ad es. con la fotocamera o il lettore QR)

Nota: se la scansione non dovesse avvenire, attivare nelle impostazioni della fotocamera «Scansiona codici QR»

- Puntare la fotocamera sul codice QR e scansionare



Alternativa: registrazione manuale

In alternativa è possibile registrare i dati manualmente all'indirizzo corona.zlmsg.ch/erfassung. Inserire nel campo «Inserire qui il codice (XXXXXXXXXX)» il codice riportato sull'etichetta «Il suo codice».

Importante: il codice QR sul kit è associato al codice a barre sulla provetta. Per garantire il buon funzionamento della procedura elettronica è importante che il test sia effettuato lo stesso giorno in cui viene scansionato il codice QR.

Si registri soltanto nel giorno in cui avviene la raccolta del campione salivare. Conservi con cura le presenti istruzioni in quanto su di esse si trova il codice QR che assicura la sua identificazione. In questo modo potrà successivamente consultare il suo risultato.

2. Registrare i dati di contatto

- Toccare la notifica che compare sullo schermo per accedere al sito «corona.zlmsg.ch»



Inserimento dei dati personali

Indirizzo e-mail:

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Numero di telefono:

Via / n.:


NPA / località:

Genere:

Nota: **indicare il nome dell'azienda**

N. AVS: *lasciare vuoto*

Cassa malati: *lasciare vuoto*

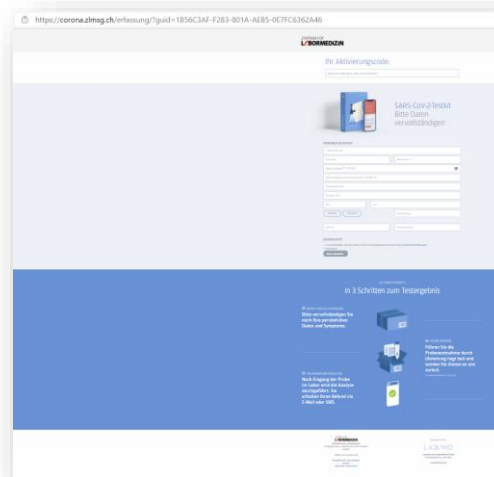


Dopo aver registrato i suoi dati, preme su «Invia i dati». Si avvia il trasferimento dei dati al laboratorio. Al termine riceverà un'e-mail di conferma.

Punto 2: raccolta del campione salivare

Non mangiare e non bere, non fumare e non masticare chewing-gum per 1 ora prima della raccolta del campione salivare.


1. Produzione del campione salivare

- Schiarirsi intensamente la gola, quindi raccogliere la saliva in bocca e sputarla nella apposita provetta larga per la raccolta del campione (tappo giallo, rosso o blu)
- Ripetere questa procedura circa 3 volte

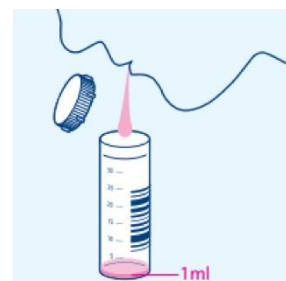

2. Aggiunta del liquido di conservazione


- Tenere saldamente in mano la provetta col campione salivare
- Ruotare il tappo della fialetta del liquido di conservazione e premere per versarlo nella provetta contenente la saliva.
- **Chiudere saldamente la provetta con il campione!**

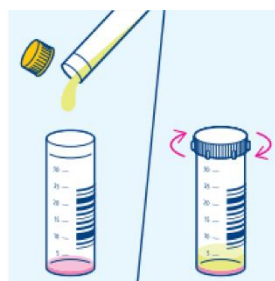

La fialetta vuota del liquido di conservazione può essere smaltita fra i rifiuti domestici.


3. Mescolamento della saliva con il liquido di conservazione

- Agitare la provetta con il campione per 2-3 volte, in modo che il liquido di conservazione e la saliva si mescolino

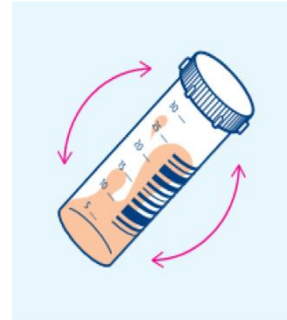

4. Preparazione della busta ed invio al centro di raccolta

- Rimettere la provetta nella busta di plastica e chiudere bene la busta
- Portare la busta all'apposito centro di raccolta aziendale
- **Prendere con sé un nuovo kit per il prossimo test**

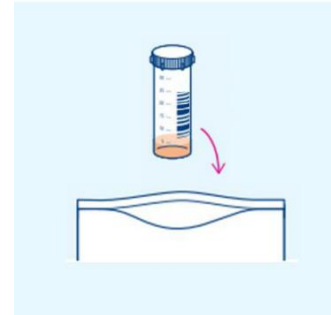

Importante: il campione deve raggiungere il punto di raccolta aziendale entro 24 ore dal prelievo del campione salivare.

Punto 3: consultazione dei risultati

Scansionando il suo codice QR accede direttamente al risultato.

In alternativa può visitare la pagina <https://befunde.zlmsg.ch/> e cliccare su «Guarda il risultato del test rapido». Si aprirà una finestra in cui potrà inserire il suo codice QR (codice di 10 cifre).



Se non viene effettuata la registrazione dei dati personali, il test non verrà analizzato!

In caso di domande è a sua disposizione il centro di coordinamento:

GU Sicherheit & Partner AG

Telefono: 071 913 27 64 o e-mail betriebstestungen@gu-sicherheit.ch